

NOTICE D'UTILISATION

Masque en tissu filtrant synthétique



CARACTÉRISTIQUES

- Modèles: suivants les recommandations AFNOR et IFTH.
- Tissu : testé et validé par la sirection Générale des Armées.
- Élastique : fibre naturelle.
- Lavable : 40 fois.

40 lavages testés par l'Armée.

Ce masque offre une parfaite respirabilité avec une excellente filtration entrante des particules les plus fines (1 et 3 μm). Il est composé d'un élastique réglable sur la tête et derrière les oreilles.

Recommandations de manipulation des masques :

Avant le lavage de votre masque, veuillez retirer la barre nasale en fer située sur le haut du masque et la remettre une fois le masque lavé.



- Avant de mettre un masque, **se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique.**
- Appliquer le masque de façon à **recouvrir le nez et la bouche**, ajuster la barrette nasale au plus près du visage vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Lorsque l'on porte un masque, **éviter de le toucher ou de le déplacer.**
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, **se laver les mains.**
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- Pour retirer le masque : **l'enlever par l'arrière (ne pas toucher le devant)** ; le mettre immédiatement dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et du savon ou au gel hydro alcoolique.

Entretien du masque

Après utilisation, le masque **doit être isolé dans un sac réutilisable** pour être lavé.

Méthode de lavage

Lavage en machine **30 minutes à 60°C** avec une lessive compatible avec les matières polyester. Stocker les masques non utilisés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE (NI DANS LA NATURE !)

*Fabricant: 3GP INNOVATION sarl / 15 avenue Henri BECQUEREL
51000 Châlons-en-Champagne / www.rubylight.fr / tel : 03 26 70 42 77*